

Beauty Dermo

Plataforma multifuncional
de vácuo para uso estético
facial e corporal

Alta tecnologia em microcontroladores

Design moderno e inovador

Emissão contínua e pulsada

Completo kit de acessórios
faciais e corporais

Novo display LCD blue light

Vácuo regulável,
potente e seguro

Aparelho leve
(ideal para atendimento *home care*)

Teclas soft touch

Fácil manuseio e programação

Filtro removível para impurezas:
protege o equipamento

Massagem mecânica
vigorosa

Desligamento automático:
ao final do tempo programado,
o equipamento automaticamente
termina a aplicação.

Microdermoabrasão:
permite que o profissional adquira o
kit peeling diamante separadamente



Beauty
Dermo

Registro ANVISA 80212480024

- Combate estrias, gordura localizada e celulite, através de drenagem e massagem mecânica.
- Auxilia no rejuvenescimento e limpeza da pele, através da utilização do peeling de diamante.
- Plataforma multifuncional de vácuo para uso estético facial e corporal.

Garantia estendida HTM


HTM
PENSANDO TECNOLOGIA
PRODUZINDO QUALIDADE.

Conheça o Beauty Dermo



Para mais informações sobre o Beauty Dermo, acesse nosso canal no Youtube "HTM e Você":
<https://www.youtube.com/watch?v=upK0k802Sv4>



Beauty
Dermo




Código: 000975


A seguir conheça os acessórios inclusos e as possibilidades de acessórios opcionais.

Visão geral

Parte frontal

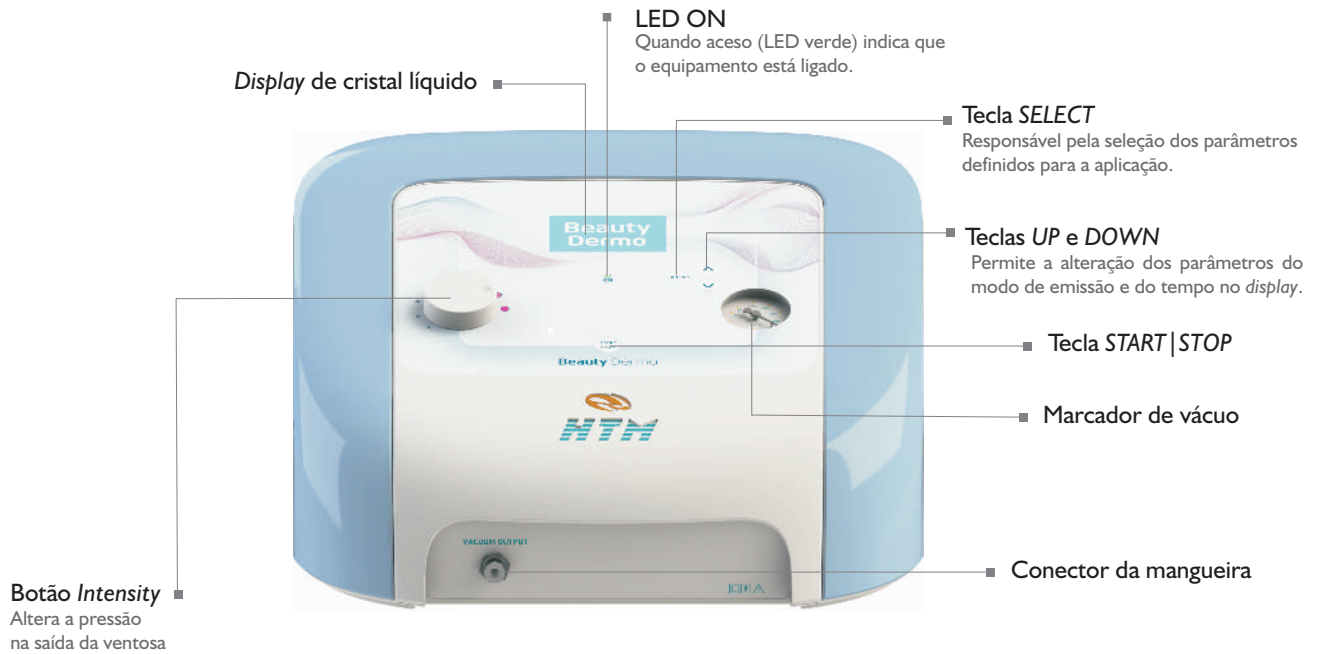

Parte traseira

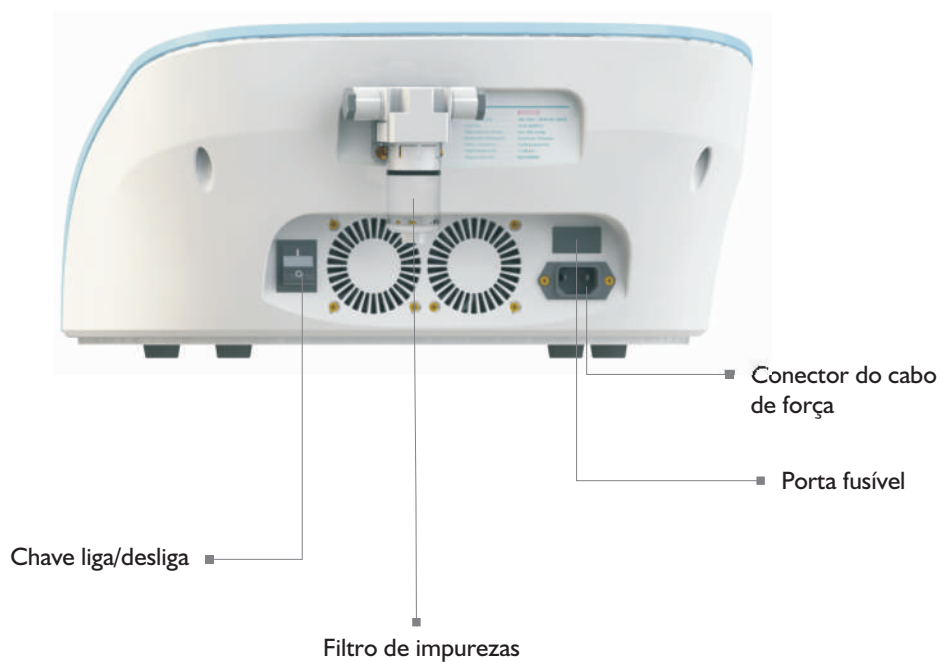

Acessórios

Confira na tabela abaixo quais acessórios acompanham o equipamento e quais são opcionais:

Acessórios inclusos

	Código	Nome	Quantidade	Descrição
	004887	Cabo de força 3x1mm ²	01 unid.	Cabo de força para conexão à rede elétrica.
	003602	Ventosa rolete corporal grande	01 unid.	Indicada para grandes áreas como coxas e glúteos realizando uma massagem mecânica.
	002745	Ventosa sino corporal boro	01 unid.	Indicada para o tratamento de grandes áreas, realizando o processo de depressodrenagem linfática.
	002747	Ventosa facial luneta 12mm	01 unid.	Indicada para o tratamento de pequenas áreas e tratamentos faciais.
	002746	Ventosa facial bico de pato	01 unid.	Indicada para depressodrenagem linfática facial.
	003163	Adaptador de engate (conexão de 6mm)	01 unid.	Adaptador que conecta a mangueira ao prolongador do aplicador ou diretamente na manopla.
	003168	Prolongador do aplicador	01 unid.	Pode ser conectado na manopla corporal. Utilizado para promover maior conforto durante a aplicação.
	001249	Mangueira	01 unid.	Mangueira para conexão com 6mm de diâmetro.
	003601	Manopla para ventosa corporal	01 unid.	Acessório em acrílico para o encaixe das ventosas rolete corporal.
	001262	Capa de silicone para ventosa corporal	01 unid.	Capa protetora para a ventosa corporal.
	004505	DVD com manual de instruções	01 unid.	Manual de instruções dos aparelhos

Acessórios opcionais

	Código	Nome	Quantidade	Descrição
	000625	Kit completo	01 Kit	Suporte para aplicadores, 1 ventosa corporal rolete pequena, 1 ventosa passarinho, 1 ventosa passarinho reto e 1 luneta 18mm.
	000645	Kit facial	01 Kit	1 ventosa bico de pato, 1 ventosa passarinho, 1 ventosa passarinho reto, 1 luneta 12mm e 1 luneta 18mm.
	003603	Ventosa rolete corporal pequena	01 unid.	Indicada para áreas menores como braços e prega glútea, realizando uma massagem mecânica.
	002744	Ventosa bico de pato corporal	01 unid.	Indicada para o tratamento de grandes áreas, pode ser usada para depressodrenagem linfática.
	002749	Ventosa facial sino mini	01 unid.	Indicada para o tratamento de pequenas áreas.
	002748	Ventosa facial luneta 18mm	01 unid.	Indicada para o tratamento de pequenas áreas.
	002750	Ventosa facial passarinho	01 unid.	Indicada para a extração de comedões e tratamentos faciais como o pós-operatório.
	002751	Ventosa facial passarinho reto	01 unid.	Indicada para a extração de comedões e tratamentos faciais como o pós-operatório.
	002742	Suporte para descanso dos aplicadores	01 unid.	Utilizado para armazenar as ventosas faciais e corporais.
	004525	Rack metálico HTM	01 unid.	Suporte para o equipamento.

Indicações e técnicas de aplicação

BEAUTY DERMO é um equipamento de vacuoterapia com emissão contínua e pulsada. Possui *design* inovador, controle por meio de teclas *soft touch* e visualização dos parâmetros em *display* LCD. Completo e versátil, suas combinações permitem tratamentos faciais e corporais e também microdermoabrasão com o peeling de diamante.

Indicações	Principais características
<ul style="list-style-type: none">- Acne- Sequela de acne- Celulite (FEG)- Estrias- Queimaduras- Gordura localizada- Fibroses e aderências- Contraturas musculares	<ul style="list-style-type: none">- Realiza massagem mecânica vigorosa, superior a massagem modeladora, possibilitando a manutenção do ritmo da massagem por um tempo prolongado (pressão e velocidade constantes).- Gera menor desgaste físico do profissional durante as manobras.- Possibilita a realização de depressodrenagem linfática. Auxilia na melhora do contorno corporal.- É indicado no pré e pós-operatório de lipoaspiração.- Ameniza cicatrizes retráteis e aderentes.- Realiza liberação miofascial.- Não interfere na rotina diária do paciente.

TÉCNICAS DE APLICAÇÃO

- 1) A pele deve estar limpa e livre de vestuário.
- 2) Retire todos os adornos metálicos, como colares e brincos, etc. Esse procedimento evita lesões ocasionadas pela possível sucção desse tipo de material.
- 3) Admite-se pequena quantidade de creme, gel ou óleo para massagem, com ou sem princípios ativos em sua formulação, para auxiliar o deslizamento dos aplicadores.
- 4) Ao selecionar os aplicadores, verifique o mais indicado. Não utilize aplicadores grandes em regiões pequenas, evitando a perda de vácuo através dos orifícios formados entre o aplicador e a pele.
- 5) Inicie o tratamento com a técnica Palpar-Rolar, detectando as zonas de congestionamento, tecidual ou veno-linfático.
- 6) Em seguida, realize a Depresso Massagem Pulsada (DMP) para relaxar as regiões tensionadas, além de diminuir e eliminar as tensões presentes no trajeto veno- linfático. Respeite as linhas de clivagem da pele e evite regiões com presença de hematomas, microvarizes e varizes.
- 7) Realize manobras suaves com o método de Depresso-Massagem Contínua (DMC), aumentando gradativamente até causar uma hiperemia, sempre no sentido distal-proximal, respeitando o sentido das fibras musculares. O objetivo é descongestionar as zonas lipodistróficas e melhorar a fluidez da substância fundamental.
- 8) Novamente com a Depresso Massagem Pulsada (DMP), aplique sobre as zonas ganglionares: supra clavicular, inguinal e poplíteo, realizando um bombeamento mecânico (manobra de abertura e fechamento).
- 9) Agora, realize a Depresso Drenagem Linfática (DDL), com uma pressão abaixo de 100 mmHg, movimentando lentamente no sentido dos gânglios linfáticos, provocando uma estase veno-linfática para eliminação de detritos.
- 10) Utilize a Depresso Massagem Pulsada (DMP) para encerrar com a manobra de fechamento ganglionar.

SUGESTÕES DE TRATAMENTOS

Estrias

Procedimento:

Sentido: seguir a disposição das linhas de clivagem da pele.

- 1) Depresso Massagem Pulsada ao redor da região com estria.
- 2) Depresso Massagem Contínua sobre a estria.

Objetivos: melhorar a troficidade da cicatriz atrófica, com a estimulação dos fibroblastos e reconstrução do colágeno e fibra elásticas.

Edemas, pré e pós-operatório, queimaduras e cicatrizes

Objetivos

Pré-operatório:

Fortalecer os vasos sanguíneos e linfáticos da região a ser operada, desobstruindo possíveis congestionamentos.

Pós-operatório:

Suavizar consideravelmente edemas, drenando e descongestionando os tecidos e promovendo uma cicatrização mais rápida e de melhor qualidade. Nos procedimentos pós-operatórios, ao seccionar o tecido, os vasos capilares e linfáticos são rompidos e levam de 7 a 15 dias para restabelecer sua circulação.

Lipoaspiração

Início: 24 horas do pós-operatório.

Procedimento

- 1) Depresso Massagem Pulsada para a estimulação ganglionar (manobra de abertura e fechamento).
- 2) Depresso Massagem Linfática para a drenagem de edemas e hematomas.

Objetivos: aliviar o desconforto, acelerar a absorção de equimoses e auxiliar no equilíbrio do tecido (canais abertos pela cânula).

Queimaduras e cicatrizes hipertróficas

Início: depende do estágio de cicatrização e da sensibilidade do paciente.

Procedimento

- 1) Depresso Massagem Pulsada para a estimulação ganglionar (manobra de abertura e fechamento).
- 2) Depresso Massagem Linfática para a drenagem de edemas e hematomas.

Objetivos: Desfibrosagem, realinhamento das fibras e melhora da qualidade da pele.

Cicatrizes hipertróficas e queimaduras

Atenuar imperfeições, guiando o tecido o mais perto possível da normalidade. A ação do vácuo provoca um desfibrosamento e realinha as fibras colágenas e elásticas pelo aumento de irrigação e oxigenação do tecido.

Mamoplastia

Início: 5 dias do pós-operatório.

Abdominoplastia

Início: 7 dias do pós-operatório.

Face lifting e bleforoplastia

Início: 5 dias do pós-operatório

Procedimento:

- 1) Depresso Massagem Pulsada para estimulação ganglionar (manobra de abertura e fechamento).
- 2) Depresso Massagem Linfática para drenagem de edemas e hematomas.

Objetivos: avaliar o desconforto, melhorar a cicatrização, evitar a formação de fibrose e tonificar tecidos.

Envelhecimento cutâneo: rugas

Procedimento

- 1) Depresso Massagem Contínua agindo como esfoliante, para retirar da camada córnea as células descamantes e desempenhar um papel de regulação e hidratação.
- 2) Depresso Massagem Pulsada para restaurar a microcirculação cutânea, estimulando a atividade dos fibroblastos e melhorando a flexibilidade da pele.
- 3) Depresso Massagem Linfática para estimular os traços vasculares, drenar os exudatos metabólicos (melhorando a cor da pele) e realizar um "alisamento" cutâneo.

Acne e seborréia

Procedimento

- 1) Depresso Massagem Contínua agindo como esfoliante, para retirar da camada córnea, das células descamantes e desempenhar um papel de regulação e hidratação.
- 2) Depresso Massagem Pulsada para restaurar a microcirculação cutânea, estimulando a atividade dos fibroblastos e melhorando a flexibilidade da pele.
- 3) Depresso Massagem Linfática para estimular os traços vasculares, drenar os exudatos metabólicos (melhorando a cor da pele) e realizar um "alisamento" cutâneo.

Instalação do produto



1) Conecte o cabo de força ao equipamento.



2) Conecte o equipamento na tomada 110V ou 220V.



3) Conecte a mangueira azul ao equipamento.




4) Encaixe o adaptador de engate à mangueira de conexão.



5) Encaixe o adaptador de engate no prolongador do aplicador.



6) A manopla com capa de silicone vem protegida com um plástico; remova essa proteção.

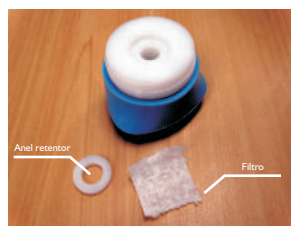

7) Na manopla com capa de silicone deve-se colocar um filtro para evitar acúmulo de sujidades.



8) Observe o filtro colocado embaixo do anel retentor.



9) Rosqueie a ventosa rolete grande ou pequena.



10) Rosqueie o prolongador do aplicador na manopla para ventosa corporal.



11) Rosqueie a ventosa no adaptador de engate.



12) Ligue o equipamento.

Detalhe de montagem

Acoplamento da mangueira



Desacoplamento da mangueira



Cuidados com o aparelho

CUIDADOS TÉCNICOS

Antes de ligar o equipamento, certifique-se de que está ligando-o conforme as especificações técnicas localizadas na etiqueta do aparelho.

Não abra o equipamento em hipótese alguma, pois além de perder a garantia você colocará em risco a sua saúde. Ocorrendo qualquer defeito, entre em contato com a HTM, que lhe informará a assistência técnica autorizada mais próxima de você.

Não substitua o fusível por outro de valor diferente do especificado na etiqueta do equipamento.

Nunca desconecte o plug da tomada puxando pelo cabo de conexão. Não utilize o equipamento empilhado ou adjacente a outro equipamento.

CUIDADOS COM A LIMPEZA

Limpeza do gabinete

Utilize apenas um pano seco

Limpeza do filtro de impurezas

Para limpar o filtro, localizado na parte posterior do equipamento, gire o reservatório plástico no sentido horário. Após a remoção, limpe utilizando água e sabão. Não use produtos químicos e/ou solventes.

Após a limpeza, encaixe o reservatório novamente e gire no sentido anti-horário, exercendo leve pressão para evitar a perda de vácuo.

Limpeza dos Aplicadores

Após utilizar os aplicadores, limpe-os com água corrente e detergente neutro ou sabão. Limpe diariamente os aplicadores antes de guardá-los, para remover o excesso de géis e/ou produtos cosméticos utilizados e para evitar que produtos sequem ou fiquem incrustados nos eixos dos mesmos, danificando sua aplicabilidade.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO

Não armazene o equipamento em locais úmidos ou sujeitos à condensação.

Não armazene o equipamento em ambiente com temperatura superior a 60°C ou inferior a -20°C.

Não exponha o equipamento ao sol, chuva ou umidade excessiva.

CUIDADOS NO TRANSPORTE

Para transportar o equipamento, utilize o mesmo processo de embalagem usado pela HTM. Procedendo desta forma, você garantirá a integridade do mesmo. Para isso, aconselha-se que a embalagem do equipamento seja guardada.

RECOMENDAÇÕES

O excesso de cremes, géis ou óleos podem ocasionar danos ao equipamento.

A utilização da tela de filtro é obrigatória durante a massagem por vácuo. Sua utilização, associada com o filtro de proteção interno do equipamento, garante o melhor funcionamento e a durabilidade da bomba de vácuo.

O equipamento possui um filtro, localizado em sua parte posterior, que deve ser limpo frequentemente.

Dúvidas mais comuns

1. O equipamento necessita ser ligado com filtro de linha?

O equipamento não necessita ser ligado com filtro de linha, pois o mesmo possui filtro interno.

2. Quem pode operar o aparelho?

Só pode ser operado por profissionais da área, devidamente habilitados e capacitados.

3. O que é vacuoterapia?

A vacuoterapia, também conhecida como dermotonia ou endermologia, consiste basicamente na utilização de pressão negativa contínua aplicada através de aplicadores denominados manípulos ou ventosas, que apresentam-se em vários modelos e formatos, destinados a inúmeros procedimentos terapêuticos, corporais e faciais.

4. Como deve ser feita a limpeza do filtro do equipamento?

O filtro está localizado na parte posterior do equipamento e deve ser limpo frequentemente. Para limpar, remova-o do gabinete girando o reservatório no sentido horário, lave-o com água corrente e detergente neutro. Aguarde secar e recoloque no local, girando no sentido anti-horário e exercendo leve pressão para evitar a perda de vácuo.

5. Ao ser adquirido separadamente, o kit de caneta diamantada com cinco ponteiros poderá ser adaptado ao equipamento?

Sim, o kit é adaptável ao equipamento Beauty Dermo. Com ele será possível realizar o peeling de diamante.

6. Qual a espessura da mangueira do Beauty Dermo?

6 mm.

7. O equipamento pode ser utilizado com gel ou óleo?

Sim, porém é aconselhável uma quantidade mínima, somente para auxiliar no deslizamento das ventosas. Além disso, é indispensável a utilização do filtro no aplicador e sua higienização logo após a aplicação.

8. O kit peeling diamante já acompanha o equipamento Beauty Dermo ?

Não, o kit peeling diamante é um acessório e pode ser adquirido separadamente.

Características técnicas

Equipamento:**Origem:**

Nome técnico e função:
Tensão AC de alimentação:
Frequência da tensão de alimentação:
Fusível de proteção (20 x 5mm) 20AG-T:
Potência de entrada:
Temporizador:
Pressão:
Peso do equipamento sem acessórios:
Dimensões (LxAxP):
Temperatura de armazenamento:
Faixa de umidade relativa do ar recomendada para armazenamento e transporte:
Embalagem para transporte:
Número de canais de saída:

Beauty Dermo**HTM Indústria de Equipamentos Eletro-Eletrônicos Ltda**

Bomba vácuo para Estética
100V~ ou 230V~ ± 10%
50/60Hz ± 10%
1A / 250V~
100VA ± 10%
1min a 60min ± 10%
-10 A -550 mmHg
3,350Kg
383x250x330mm
-20°C a 60°C

10% a 60%
Utilizar a original
1 canal