

Beauty Face

Alta frequência portátil
com alta tecnologia

Equipamento de alta frequência
indicado para tratamentos faciais,
capilares e podológicos

Poderoso aliado no tratamento do acne



Beauty
Face

Eficaz para limpeza de pele

Utilizado também em depilação

Registro ANVISA 80212489003

- Equipamento leve e portátil de fácil manuseio
- Controle de intensidade na própria caneta
- Cabo extensor flexível
- Bolsa para transporte
- Fonte de alimentação bivolt
- Caneta aplicadora com encaixe universal

Garantia estendida HTM


HTM
PENSANDO TECNOLOGIA
PRODUZINDO QUALIDADE.

Conheça o Beauty Face



Para mais informações sobre os equipamentos da HTM, acesse nosso canal no Youtube "HTM e Você":
<https://www.youtube.com/user/HTMELETR>

Beauty
Face



Código: 001223

A seguir conheça os acessórios.

Visão geral

Caneta aplicadora



Beauty
Face

Fonte de alimentação



Acessórios

Confira na tabela abaixo quais acessórios acompanham o equipamento e quais são opcionais.

Acessórios inclusos

	Código	Nome	Quantidade	Descrição
	002726	Eletrodo de vidro cauterizador	01 unid.	Acessório deve ser utilizado com a caneta aplicadora de alta frequência. Utilizado nas técnicas de fluxação ou faiscamento direto. Indicado para o tratamento de acne.
	002728	Eletrodo de vidro cebolão pequeno	01 unid.	Acessório deve ser utilizado com a caneta aplicadora de alta frequência. Utilizado nas técnicas de fluxação ou faiscamento direto. Indicado para todas as regiões.
	002753	Necessaire HTM	01 unid.	Necessaire para acondicionamento e transporte do equipamento.
	004505	DVD manual do aparelho	01 unid.	Manual de instruções dos aparelhos.

Acessórios opcionais

	Código	Nome	Quantidade	Descrição
	002727	Eletrodo de vidro cebolão grande	01 unid.	Acessório deve ser utilizado com a caneta aplicadora de alta frequência. Utilizado nas técnicas de fluxação ou faiscamento direto.
	002733	Eletrodo de vidro saturador	01 unid.	Acessório deve ser utilizado com a caneta aplicadora de alta frequência. Utilizado nas técnicas de faiscamento indireto.
	002729	Eletrodo de vidro cebolinha	01 unid.	Acessório deve ser utilizado com a caneta aplicadora de alta frequência. Utilizado nas técnicas de fluxação ou faiscamento direto.
	002730	Eletrodo de vidro forquilha	01 unid.	Acessório deve ser utilizado com a caneta aplicadora de alta frequência. Utilizado nas técnicas de fluxação ou faiscamento direto.
	002731	Eletrodo de vidro pente	01 unid.	Acessório deve ser utilizado com a caneta aplicadora de alta frequência. Utilizada para tratamento capilar.

Indicações e técnicas de aplicação

O Beauty Face é um equipamento de alta frequência totalmente portátil com controle de intensidade na própria caneta, de fácil aplicação, utilizado em tratamentos faciais, capilares e podológicos.

Indicações	Principais características
-Limpeza de pele -Tratamento para pele acneica -Pós-operatórios -Tratamentos faciais, capilares e podológicos -Pós depilação -Facilita permeação de ativos	-Proporciona tratamentos faciais, capilares e podológicos. -Não causa efeitos sistêmicos. -Promove efeito oxigenante. -Promove efeito bactericida e fungicida. -Equipamento portátil. -Fácil manuseio.

TÉCNICAS DE APLICAÇÃO

Fluxação

Passagens lentas e regulares do eletrodo em contato direto com a pele. Descongiona e desinfeta a epiderme.

- 1) Verifique se o controle de intensidade está desligado.
- 2) Encaixe o eletrodo de vidro desejado no encaixe superior da caneta aplicadora de alta frequência. Toda a parte metálica do eletrodo de vidro deve estar totalmente encaixada na caneta aplicadora.
- 3) Ligue o controle de intensidade da caneta aplicadora.
- 4) Encoste o eletrodo na pele da(o) paciente.
- 5) Aumente a intensidade, movendo o controle de intensidade o sentido horário
- 6) Deslize o eletrodo suavemente pela pele da(o) paciente.
- 7) Após o término da aplicação, só afaste o eletrodo da pele da(o) paciente, após girar totalmente o controle no sentido anti-horário até desligar o aparelho.

Faiscamento direto

Utiliza-se o eletrodo afastado alguns milímetros da pele, ocasionando um faiscamento mais energético e visível. Tem efeito anti-séptico, hiperêmico e estimulante. É indicado para peles seborreicas e acnéicas.

- 1) Verifique se o controle de intensidade está desligado.
- 2) Encaixe o eletrodo de vidro desejado no encaixe superior da caneta aplicadora de alta frequência. Toda a parte metálica do eletrodo de vidro deve estar totalmente encaixada na caneta aplicadora.
- 3) Ligue o controle de intensidade da caneta aplicadora
- 4) Aproxime o eletrodo na pele da(o) paciente, sem encostar.
- 5) Aumente a intensidade, movendo o controle de intensidade no sentido horário.
- 6) Movimento o eletrodo, sem encostar, sobre a pele da(o) paciente.
- 7) Após o término da aplicação, gire totalmente o controle no sentido anti-horário até desligar o aparelho.

Faiscamento indireto

Consiste na aplicação da corrente de alta frequência através do eletrodo saturador. Esta técnica tem a propriedade de aumentar a vascularização da pele.

- 1) Verifique se o controle de intensidade está desligado.
- 2) Encaixe o eletrodo de vidro saturador no encaixe superior da caneta aplicadora de alta frequência. Toda a parte metálica do eletrodo de vidro deve estar totalmente encaixada na caneta aplicadora.
- 3) Entregue a caneta aplicadora para a(o) paciente. Ele(a) deve segurar a caneta aplicadora com uma mão e o eletrodo de vidro saturador com a outra mão.
- 4) Mantenha a caneta aplicadora com a(o) paciente e ligue o controle de intensidade da caneta aplicadora.
- 5) Faça movimentos de tamborilamento no rosto do paciente com uma das mãos e com a outra coloque a intensidade desejada, movendo o controle de intensidade no sentido horário. Nesse tratamento, o faiscamento vai ocorrer entre os dedos da profissional e o rosto da(o) paciente.
- 6) Massageie toda a região desejada, evitando afastar as mãos do rosto da(o) paciente
- 7) Após o término da aplicação, gire totalmente o controle no sentido anti-horário até desligar o aparelho.

Fulguração

Utiliza-se a técnica de faiscamento direto com o eletrodo especial que auxilia na cicatrização, após a extração de comedões

- 1) Verifique se o controle de intensidade está desligado.
- 2) Encaixe o eletrodo de vidro cauterizador no encaixe superior da caneta aplicadora. Toda a parte metálica do eletrodo de vidro deve estar totalmente encaixada na caneta aplicadora.
- 3) Ligue o controle de intensidade da caneta aplicadora.
- 4) Aproxime o eletrodo na pele da(o) paciente, sem encostar.
- 5) Aumente a intensidade, movendo o controle de intensidade no sentido horário.
- 6) Direcione o eletrodo cauterizador afastando alguns milímetros da pele da(o) paciente.
- 7) Após o término da aplicação, gire totalmente o controle no sentido anti-horário até desligar o aparelho e depois afaste totalmente o eletrodo da pele da(o) paciente.

Protocolo

SUGESTÕES DE TRATAMENTOS

Limpeza de pele profunda

- 1) Higienizar a pele com emulsão de limpeza.
- 2) Realizar o peeling, com equipamentos ou cosméticos, para afinar a capa córnea e extrair comedões superficiais e abertos.
- 3) Extrair os comedões com a ajuda do aplicador facial do equipamento Beauty Dermo.
- 4) Borrifar sobre a pele uma loção tônica hidratante para evitar seu ressecamento.
- 5) Aplicar a Alta Frequência em toda a face por um período de 5 a 8 minutos.
- 6) Aplicar uma máscara calmante ou secativa para diminuir os efeitos do procedimento sobre a pele.
- 7) Realizar massagem com produto nutritivo em toda a face.
- 8) Finalize com filtro solar.

Terapia capilar antiqueda e anticaspas

- 1) Aplicar a alta frequência sobre o couro cabeludo com o eletrodo pente por aproximadamente 5 minutos.
- 2) Dividir o cabelo em mechas e aplicar por todo couro cabeludo esfoliante com partículas de minerais.
- 3) Aplicar no couro cabeludo loção tônica capilar antiqueda, podendo ser aplicado vapor de ozônio em conjunto. Deixar agir por 15 minutos.
- 4) Realizar a lavagem dos cabelos após 15 minutos com shampoo fortalecedor.
- 5) Finalizar com manobras específicas no couro cabeludo com loção tônica capilar antiqueda.


Instalação do produto



1) Antes de ligar o equipamento verifique a voltagem 110V ou 220V.



2) Conecte o equipamento na tomada.

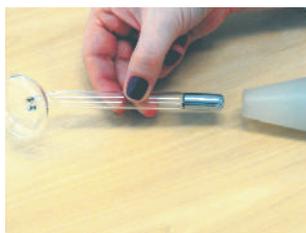

3) Conecte o eletrodo ao aparelho.



4) Ligue o equipamento.

Cuidados com o aparelho

CUIDADOS TÉCNICOS

Antes de ligar o equipamento, certifique-se que está ligando-o conforme as especificações técnicas localizadas na etiqueta do equipamento.

Não abra o equipamento em hipótese alguma, pois, além de perder a garantia, você estará pondo em risco a sua saúde. Qualquer defeito, contacte a HTM Eletrônica que informará a Assistência Técnica Autorizada HTM Eletrônica mais próxima de você.

Não substitua o fusível por outro de valor diferente do especificado na etiqueta do equipamento.

Nunca desconecte o plug da tomada puxando pelo cabo de conexão.

Não utilize o equipamento empilhado ou adjacente a outro equipamento.

Para aumentar a vida útil do cabo, não desconecte o equipamento da tomada puxando pelo cabo.

CUIDADOS COM A LIMPEZA

Após a utilização do(s) eletrodo(s), higienizar com álcool 70% e secar com lenço de papel.

Para limpar o equipamento utilize um pano seco. Agindo assim você estará conservando seu equipamento.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO

Não armazene o equipamento em locais úmidos ou sujeitos a condensação

Não armazene o equipamento em ambiente com temperatura superior a 60°C ou inferior a -20°C

Não exponha o equipamento ao sol, a chuva ou a umidade excessiva.

CUIDADOS NO TRANSPORTE

Se houver necessidade de transportar o equipamento, utilize o mesmo processo de embalagem utilizado pela HTM Eletrônica. Procedendo desta forma, você estará garantindo a integridade do equipamento. Para isso, aconselha-se que a embalagem do equipamento seja guardada.

RECOMENDAÇÕES

Manuseie a caneta com cuidado, pois impactos mecânicos podem danificá-la, principalmente se a mesma estiver com o eletrodo conectado.

Não introduza objetos nos orifícios do equipamento ou na caneta de aplicação.

Jamais coloque ou retire o eletrodo da caneta aplicadora com o aparelho ligado.

Jamais utilize em áreas da pele que estejam úmidas e/ou com produtos que contenham substâncias inflamáveis como álcool, éter, entre outros.

Dúvidas mais comuns

1. Posso utilizar outros tipos de eletrodos no equipamento?

Sim, é possível utilizar os eletrodos forquilha, saturador, cebolinha, pente, rolinho, entre outros, que devem ser adquiridos separadamente.

2. Em quais tratamentos posso utilizar esse equipamento?

Pode ser utilizado depois da extração de comedões, pós depilação, em tratamentos capilares e podológicos.

3. Gestante podem aplicar ou receber Alta frequência?

É contra indicado o uso em gestantes, já a gestante que estiver manipulando o equipamento, não deve fazer a técnica de tamborilamento, onde ela também teria contato com o campo formado pela Alta Frequência.

4. Qual é a garantia do equipamento?

São 3 meses de garantia legal e 15 meses da HTM, no total de 18 meses, contados a partir da emissão da nota fiscal.

Características técnicas

Equipamento:**Origem:**

Tensão AC de alimentação:
Frequência da tensão de alimentação:
Fusível de proteção (20 x 5mm) 20AG-T:
Potência de entrada:
Peso do equipamento sem acessórios:
Dimensões da caneta aplicadora (LxA):
Dimensões da fonte de alimentação (LxAxP):
Temperatura de armazenamento:
Faixa de umidade relativa do ar recomendada para armazenamento e transporte:
Embalagem para transporte:
Número de canais de saída:

Beauty Face**HTM Indústria de Equipamentos Eletro-Eletrônicos LTDA**

120V~ ou 220V~ ± 10%
60Hz ± 10%
1A / 250V
15VA
0,765Kg
40x180mm
70x55x110mm
-20°C a 60°C
10% a 60%
Utilizar a original
1 canal